

Limpieza y Esterilización de las Mascarillas Laringeas

El desinflado hace la diferencia

Antes de esterilizar en autoclave sus mascarillas laringeas **reusables**, debe de desinflar completamente la mascarilla. Cualquier aire o humedad que quede en la mascarilla, podría expandir el maguito en el autoclave causando daños irreparables al equipo.

primerpaso



Lave la mascarilla laringea en agua caliente con jabón o bien con bicarbonato de sodio.

No utilice formaldehído, Fenol, Glu-teraldehidos, antisépticos yodados o lubri-cantes de silicón.

segundopaso



Limpie la parte interior de la mascarilla insertando delicadamente un cepillo por entre las barras teniendo cuidado en no dañarlas.

tercerpaso



Enjuage la mascarilla en agua tibia.

cuartopaso



Asegurarse que la mascarilla laringea, tanto su interior como el exterior, esten secos.

quintopaso



Antes esterilizar en autoclave, debe ser desinflada por completo.

sextopaso



El procedimiento de esterilización debe realizarse en un ciclo estándar 134° (+4/-0°) C/273° F por tres minutos.

No utilice oxido de etileno, radiaciones gamma, esterilización con químicos o este-rilización con calor seco.

séptimopaso



Inspeccione la mascarilla laringea.

octavopaso



Marque en la tarjeta de registro la fecha de cada uso.

RECOMENDAMOS NO SE
UTI-LICEN LAS MASCARILLAS
REU-SABLES MAS DE **40**
VECES



Si la mascarilla laringea reprueba cualquiera de las pruebas antes de usarla, esta debe ser descartada inmediatamente.